



راهنمای کار با دستگاه الکتروشوک NIHON KOHDEN مدل TEC-5521/5531

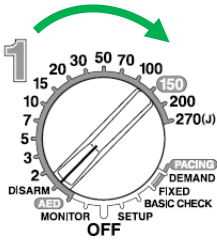


۱- در ابتدا با چرخاندن کلید سلکتوری در جهت عقربه های ساعت همزمان دستگاه روشن شده و می توانید انرژی مورد نظر را انتخاب نمایید و دستگاه آماده شارژ می باشد.

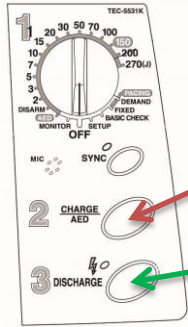

۲- با فشردن کلید شماره ۲ (Charge) که هم به روی بدنه و هم روی پدل طراحی شده است ، دستگاه شارژ می گردد. دستگاه در مدت ۳ ثانیه ۲۰۰J و در مدت ۵ ثانیه ۲۷۰J را شارژ می نماید.


۳- جهت دشارژ کلیدهای شماره ۳ را بر روی پدلها همزمان فشار دهید تا تخلیه الکتریکی صورت گیرد.

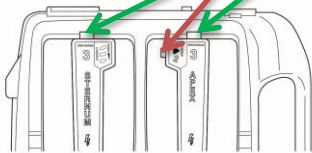

* شوک دادن سینکرونایز:

- ❖ دقت داشته باشید زمانی از کلید **Sync** می توانید استفاده نمایید که بیمار دارای ریتم قلبی باشد.
- کابل ECG را به بیمار متصل نمایید. (یا با تغییر آیکون **Lead** در حالت **Monitor** آن را بر روی **PADDLE** قرار دهید.)
- با فشردن دکمه **Sync** حالت سینکرونایز را فعال می نماییم. در این حالت کلمه **Sync** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و نشانگر موج **QRS** نیز روی صفحه نمایش به شکل خط چین ظاهر می شود.
- بقیه مراحل مانند شوک غیر سینکرونایز است.

* مراحل انجام تست روزانه الکتروشوک:

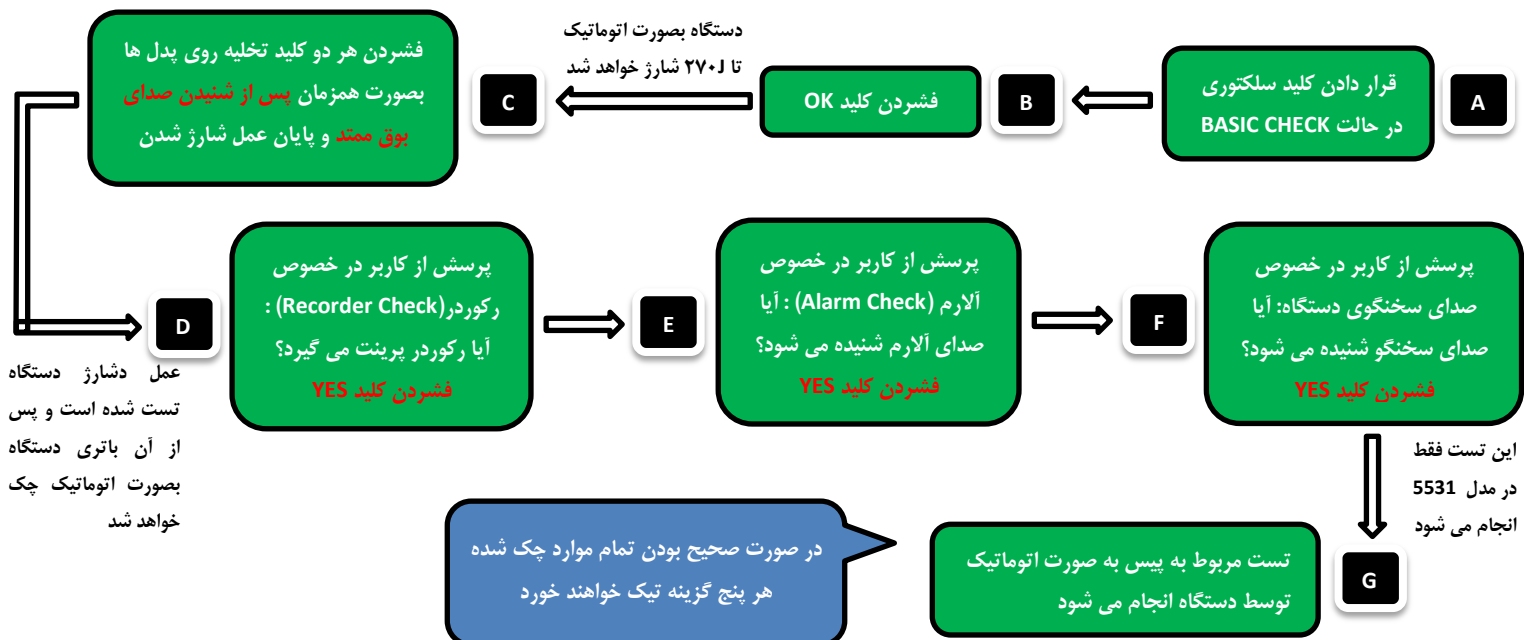

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر (آبادانا) - شماره ۳۲ - شرکت تکوین طب

تلفن: ۰۶-۸۸۷۶۵۰۱۱ فکس: ۰۱۰-۸۸۷۶۵۰۱۰